

A TESZTELÉS MENETE

Tesztelés előtt

A mintavétel előtt legalább 10 perccel ne vegyen semmit a szájába, beleértve ételt, italt, rágógumit vagy dohányterméket. A tesztelés előtt legalább 20 másodpercig mosson kezet szappannal és vízzel. Ha szappan és víz nem áll rendelkezésre, használjon legalább 60%-os alkoholtartalmú kézfertőtlenítőt.

1. lépés: Mintavétel

- Vegye ki a tölcsért és a műanyag csövet; illessze a tölcsért a csőre.
- Köhögjön 3-5 alkalommal mélyről.
Megjegyzés: Viseljen arcmaszkot, vagy takarja el a száját és az orrát egy zsebkendővel, amikor köhög, és tartson kellő távolságot másoktól.
- Óvatosan köpködjön a nyálát a tölcsérbe.
- A nyálfolyadék szintje - buborékok nélkül - érje el a jelzett vonalat.
Megjegyzés: addig folytassa a mintagyűjtést, amíg a gyűjtőcsövön jelzett vonalig a nyálfolyadék szintje el nem ér. Ha megvan, akkor tegye a tölcsért a hulladékgyűjtő tasakba.

1




2. lépés: Minta előkészítése

- Nyissa fel a puffert csomagolását, és öntse az összes puffert a nyálmintához.

- Tegye a cseppentővel ellátott hegyet a csőre. Finoman rázza össze a folyadékot 10-15 alkalommal.

2

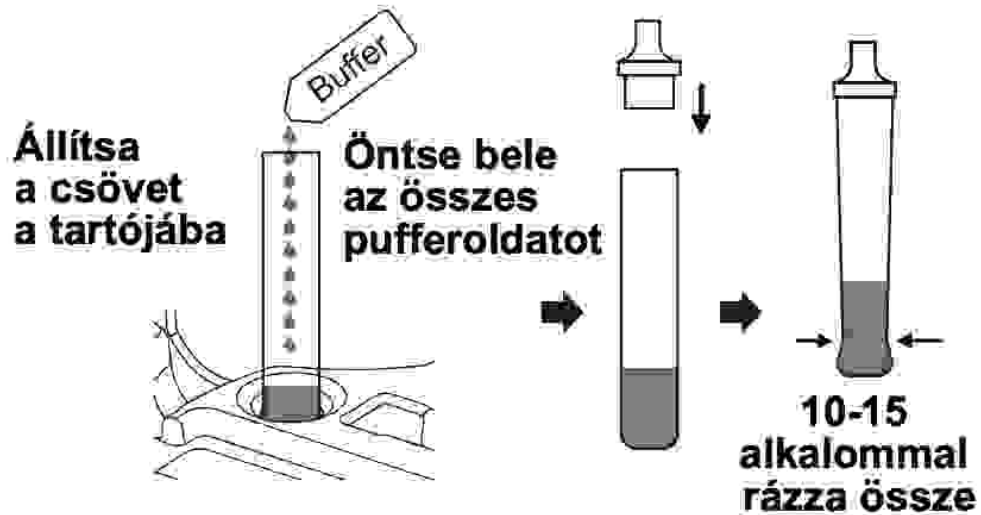

3. lépés: A tesztelés

- Vegye ki a tesztkazettát a lezárt fóliatasakból, és egy órán belül használja is fel. A legpontosabb eredményt akkor kapjuk, ha a tesztet közvetlenül a fóliatasak felnyitása után végezzük el.
- Helyezze a tesztkazettát egy sima, vízszintes felületre. Fordítsa meg a csövet, és adjon 2 csepp oldatot a tesztkészülék (S) jelzéssel ellátott nyílásába. Ezután indítson el egy időmérőt. Amíg a teszt dolgozik, ne nyúljon hozzá, és ne mozgassa a tesztkazettát.

3




4. lépés: A teszteredmény leolvasása

- 15 perc múlva olvassa le az eredményt. Ne értelmezze az eredményt 20 perc elteltével.

- A teszt befejezése után helyezze a teszt összes alkatrészét a műanyag hulladékgyűjtő tasakba, és a helyi előírásoknak megfelelően dobja ki. Ne használja fel újra a készlet egyetlen alkatrészét se.
- A teszt eltávolítása után alaposan mosson kezet

4


15 perc

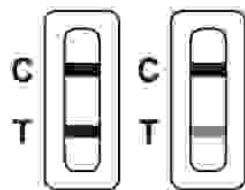

Pozitív



Negatív

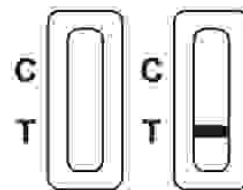

Érvénytelen

EREDMÉNYEK LEOLVASÁSA

Kérjük, tudassa a teszt eredményét egészségügyi szolgáltatójával, és gondosan kövesse a helyi COVID irányelveket/követelményeket.

POZITÍV: * **Két színes vonal jelenik meg.** Az egyik színes vonalnak a kontroll sávban (C) kell lennie, míg a másiknak a teszt sávban (T).

*MEGJEGYZÉS: A szín intenzitása a tesztvonal sávjában (T) a SARS-CoV-2 antigén mennyiségétől függ. Tehát bármilyen színárnyalatú színt a (T) sávban pozitívnak kell tekinteni.

A pozitív eredmény azt jelenti, hogy a tesztelt személy nagy valószínűséggel COVID-19 fertőzött, de a pozitív mintát meg kell még erősíteni. Azonnal vonuljon önkéntes karanténba a helyi iránymutatásoknak megfelelően, és haladéktalanul lépjen kapcsolatba háziorvosával/orvosával vagy a helyi egészségügyi szolgáltatóval a helyi hatóságok utasításai szerint. A páciens teszteredményét PCR teszttel meg fogják erősíteni, és elmagyarázzák a további teendőket.

NEGATÍV: Színes vonal jelenik meg a kontroll sávban (C), viszont nem látható színes vonal a teszt sávban (T).

A páciens valószínűleg nem kapta el a COVID-19 betegséget. Lehetséges azonban, hogy a teszt téves negatív eredményt ad - hamis negatív - néhány COVID-19-ben szenvedő beteg esetében. Ez azt jelenti, hogy az illető a teszt negatív eredménye ellenére is lehet COVID-19 beteg.

Ha olyan tüneteket tapasztal, mint fejfájás, migrén, láz, szaglász vagy ízérzékelés elvesztése, akkor forduljon a legközelebbi egészségügyi intézményhez a helyi szabályok szerint. Meg is ismételheti a tesztet egy új készlettel. Gyanú esetén, a tesztet 1-2 nap múlva ismételje meg, mivel a koronavírus nem mutatható ki pontosan a fertőzés minden fázisában.

Negatív teszteredmény esetén is be kell tartani a távolságtartási és higiéniai szabályokat. A közlekedési/utazási, rendezvényeken való részvétel tekintetében a helyi COVID-irányelveket/követelményeket kell követni.

ÉRVÉNYTELEN: A kontroll sávban (C) sem látható színes vonal.

Az elégtelen mintamennyiség vagy a nem megfelelő eljárás a legvalószínűbb okai ennek.

Olvassa el még egyszer a használati utasításban a tesztelés menetét, és ismételje meg azt egy új teszttel, vagy lépjen kapcsolatba az orvosával, vagy forduljon COVID-19 tesztközponthoz.

KORLÁTOZÁSOK

1. A tesztelési lépések be nem tartása pontatlan eredményhez vezethet.
2. A COVID-19 antigén gyorseszteszt (nyálteszt) kizárólag in vitro - külsőleges - diagnosztikai önellenőrzésre szolgál.
3. A teszteredményt más laboratóriumi vizsgálatokból és kiértékelésekből származó egyéb klinikai leletekkel együtt kell figyelembe venni.
4. Ha a teszteredmény negatív vagy reakció nélküli, miközben a klinikai tünetek fennállnak, ez azért lehetséges, mert a nagyon korai vírusfertőzés még nem mutatható ki. Ajánlott 1-2 nappal később újratestelni egy új teszttel, vagy kórházba menni a fertőzés kizárása érdekében.
5. COVID-19 pozitív eredmény adódhat nem-SARS-CoV-2 koronavírus törzsekkel való fertőzés vagy egyéb zavaró tényezők miatt is.